

Infusomat[®] Space

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE


Kort info baserad på bruksanvisningen

Version 1.1

Observera att detta infoblad endast är avsett som kort referens.

Innan pumpen används måste samtliga användare konsultera bruksanvisningen.

Starta volympumpen; starta infusion

1, Tryck  för att starta pumpen.



2, Tryck  och  för att öppna dörren

3, Sätt i aggregatet från höger till vänster:

a) Placera först klämman med två hål på plats på de två pinnarna sedan den andra.

b) Ta tag i den spetsiga delen av aggregatets friflödesspär och tryck den rakt in i den öppna gröna slitsen, med flata sidan först.


c) Stäng sedan pumpdörren.

4, Bekräfta val av aggregat med . Prima vid behov med .

5, Besvara frågorna i startmenyn med NEJ  alt JA .


6, Ange VSSI med . Bekräfta med .

7, Ange Flöde med . Bekräfta med .



8, Tryck  för att starta infusionen.



Infusion färdig; avlägsna aggregatet och stäng av pumpen

1, Tryck  för att stoppa infusionen. Bryt patientförbindelsen.

2, Stäng rullklämman.



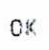
3, Tryck  och öppna pumpdörren med JA .

4, Tryck in den gröna öppningsknappen i botten på friflödesspärren innan aggregatet avlägsnas.






5, Stäng dörren. Tryck och håll in  i 3 sekunder för att stänga av pumpen.

OBS – Pumpen kan inte stängas av om aggregatet sitter kvar!








Ändra flöde under drift

Öppna menyn för ändring av flöde med . Ange med . Bekräfta med .





Ändra ocklusionstryck

- 1, Tryck  under drift för att skifta till huvudmenyn.
- 2, Ändra trycknivå i meny "Alternativ". Markera menyn "Tryck" och tryck .
- 2, Välj nivå med  eller  och bekräfta med .



Infusion av bolus

- 1, **Bolus med förinställd volym:** Tryck  under drift. Tryck därefter .
Ange bolusvolym med . *Starta bolus med .
Avbryt bolusinfusionen när som helst genom att trycka på .
*Bolusflödet kan ändras. Se bruksanvisningen för mer info.
- 2, **Manuell bolus:** Tryck  under drift. Tryck och håll in .
Släpp knappen för att stoppa bolus.









Nollställ volym i menyn "Status"

- 1, Tryck  under drift för att skifta till huvudmenyn.
- 2, Välj meny "Status" med , tryck  och dokumentera volymen.
- 3, Välj inf. vol. med  och nollställ värdet med JA  .

Standby

- 1, Stoppa infusionen. Tryck därefter på  i 3 sekunder.
- 2, Pumpen går automatiskt i standby.
Avbryt standby genom att trycka .

Läkemedelslista

- 1, Vid uppstart, välj läkemedelslista med JA .
Om inte läkemedelslista önskas, tryck NEJ .
- 2, Välj kategori med  och bekräfta med .
- 3, Välj läkemedel från listan med  och bekräfta med .
- 4, Kontrollera värden och ändra med  vid behov.
Starta infusionen med .